

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES
FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

MASTER BAC HEALTH CL

ECOMASTER

POR UM MUNDO MAIS LIMPO



+ HEALTH CARE

MASTER BAC HEALTH CL é um Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas e Artigos Não Críticos, formulado à base de Hipoclorito de Sódio, potente princípio ativo para desinfecção de superfícies. É eficaz contra amplo espectro microbida, mesmo diluído em água, garantindo excelente custo em uso.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aparência: Líquido móvel

Cor: Amarelo, Límpido

Odor: Característico de Cloro

pH puro: 12,5 - 13,5 pH Sol. 1%: Min. 9,5

Densidade: 1,160 - 1,210 g/ml

Teor de Cloro ativo: 9,9%

COMPOSIÇÃO

Ingrediente Ativo, Estabilizante, Veículo.

Princípio ativo: Hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo 9,90% p/p.

FINALIDADE

Master Bac Health CL é um desinfetante à base de Hipoclorito de Sódio formulado para desinfecção de pisos, superfícies fixas e artigos não críticos em áreas hospitalares, clínicas, consultórios, laboratórios e outros ambientes de assistência à saúde.

Eficácia bactericida comprovada frente a cepas de:

- Salmonella choleraesuis;
- Staphylococcus aureus;
- Pseudomonas aeruginosa.

MODO DE USAR

Preparar solução de 0,5% (5 ml de MASTER BAC HEALTH CL por litro de água) - min. 400 ppm. Utilizar preferencialmente diluidor Ecomaster para a diluição do produto.

Superfícies fixas: Aplicar a solução em superfícies não sensíveis ao cloro. Deixar agir por no mínimo 10 minutos e secar. Não enxaguar.

Artigos e Acessórios: Realizar limpeza e secagem dos artigos e/ou acessórios, colocá-los por imersão na solução por 10 minutos. Enxaguar e secar.



FICHA TÉCNICA

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido, consulte de imediato o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Evite o contato com a pele e os olhos. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone 0800 - 0148110. Não reutilizar a embalagem vazia.

EMBALAGEM

Bombona plástica 5 litros.

CONSERVAÇÃO

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

ECOMASTER QUÍMICA IND. E COM. LTDA
RUA JOAQUIM THOMAZ DA SILVA, 521
BAIRRO JARDIM MARACANÃ
UBERABA MG CEP 38041 097
(34) 3311 2005 WWW.ECOMASTER.IND.BR
ecomaster@ecomaster.ind.br
CNPJ - 05.642.412/0001-49
NºAut. MS - 3.04.145-2
PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA M/S Nº - 341450029
RESPONSÁVEL TÉCNICO - NATALIA ROBERTA DA CRUZ PRUDENTE
CRQ/MG - 02414937 2ª REGIÃO