

MASTER BAC HEALTH QA

+ HEALTH CARE

MASTER BAC HEALTH QA é um Detergente/Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas e Artigos Não Críticos, formulado à base de Quaternário de Amônio, potente princípio ativo para desinfecção de superfícies. É eficaz contra amplo espectro microbicida, e sua alta concentração garante excelente custo por litro diluído. Sua composição combina tensoativos e sequestrantes aos agentes desinfetantes, sendo assim um produto Detergente/Desinfetante, garantindo sua boa performance em limpeza e segurança na desinfecção em somente uma etapa (2 em 1). Possui baixo odor, além de seu princípio ativo não ser agressivo às pessoas e ao meio ambiente, sendo seguro para uso mesmo em berçários e maternidades.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aparência: Líquido móvel
Cor: Azul
Odor: Característico de Quaternário
pH puro: 9,0 - 10,0 pH Sol. 1%: 8,0 - 9,0
Densidade: 0,980 - 1,000 g/ml
Teor de Quaternário de Amônio (PM 360): 17,6% p/p.

COMPOSIÇÃO

Antioxidante, Corante, Nivelador, Perfume, Sequestrante, Tensoativo Anfótero, Tensoativo Catiônico, Tensoativo Não Iônico, Veículo.

Princípio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 17,6% p/p.

FINALIDADE

Master Bac Health QA é um Detergente/Desinfetante à base de Quaternário de Amônio formulado para limpeza e desinfecção de superfícies fixas tais como pisos, paredes, bancadas, portas, mobiliários, e artigos não críticos em estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde, tais como hospitais, clínicas, consultórios médicos, consultórios odontológicos, postos de saúde.

Eficácia bactericida comprovada frente a cepas de:

- Salmonella choleraesuis;
- Staphylococcus aureus;
- Pseudomonas aeruginosa.

MODO DE USAR

Preparar solução de 1% (10 ml de MASTER BAC HEALTH QA por litro de água) - min. 1760 ppm. Utilizar preferencialmente diluidor Ecomaster para a diluição do produto.

Superfícies fixas: Aplicar a solução diluída com pulverizadores, mop ou pano. Deixar agir por no mínimo 10 minutos e remover o excesso se necessário. Não enxaguar.

Artigos e Acessórios: Após a limpeza e secagem dos artigos e/ou acessórios, colocá-los por imersão na solução por 10 minutos. Enxaguar e secar antes do uso.

ECOMASTER
POR UM MUNDO MAIS LIMPO



FICHA TÉCNICA

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido, consulte de imediato o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Evite o contato com a pele e os olhos. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone 0800 - 0148110. Não reutilizar a embalagem vazia.

EMBALAGEM

Bombona plástica 5 litros.

CONSERVAÇÃO

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

ECOMASTER QUÍMICA IND. E COM. LTDA
RUA JOAQUIM THOMAZ DA SILVA, 521
BAIRRO JARDIM MARACANÃ
UBERABA MG CEP 38041 097
(34) 3311 2005 WWW.ECOMASTER.IND.BR
ecomaster@ecomaster.ind.br
CNPJ - 05.642.412/0001-49
NºAut. MS - 3.04.145-2
PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA M/S Nº - 341450033
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ANDRO DONIZETE TEODORO
CRQ/MG - 02417828 2ª REGIÃO