

Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas

Master Guardian

+ HEALTH CARE

MASTER GUARDIAN é um desinfetante hospitalar para superfícies fixas formulado à base de Biguanida e Quaternário de Amônia de Quinta Geração. É recomendado para limpeza e desinfecção de pisos, paredes, equipamentos e produtos médicos não críticos. Seu pH neutro permite utilização nos mais diversos tipos de pisos e superfícies, sem agressão às mesmas, além de ser seguro para o usuário. Sua fórmula é livre de aldeídos e anfóteros. Possui amplo poder bactericida mesmo utilizado em água dura, além de manter o poder de desinfecção mesmo em presença de matéria orgânica.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aparência: Líquido móvel

Cor: Verde

Odor: Característico de Quaternário

pH puro: 6,0 - 8,0 pH Sol. 1%: 6,0 - 8,0

Teor de Cloridrato de Polihexametilenobiguanida: 1,2% p/p.

Teor de Cloreto de Didecil Dimetil Amônio: 6,5% p/p.

COMPOSIÇÃO

Cloridrato de Polihexametilenobiguanida, Cloreto de Didecil Dimetil Amônio, tensoativos não iônicos, sequestrante, acidulante, corante e veículo.

Princípios ativos: Cloridrato de Polihexametilenobiguanida: 1,2% p/p; Cloreto de Didecil Dimetil Amônio: 6,5% p/p.

FINALIDADE

Master Guardian é um Detergente/Desinfetante à base de Biguanida e Quaternário de Amônio de Quinta Geração formulado para limpeza e desinfecção de superfícies fixas tais como pisos, paredes, bancadas, portas, mobiliários, e artigos não críticos em estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde, tais como hospitais, clínicas, consultórios médicos, consultórios odontológicos, postos de saúde. Eficácia microbicida comprovada: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus MRSA, Klebsiela pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium bovis, Clostridium difficile, Enterococcus vre, Bacillus subtilis, Candida albicans, Aspergillus niger, Trichophyton mentagrophytes.

MODO DE USAR

Preparar solução de 0,25% (2,5 ml de MASTER GUARDIAN por litro de água). Utilizar preferencialmente diluidor Ecomaster para a diluição do produto.

Superfícies fixas: Aplicar a solução diluída com pulverizadores, mop ou não tecido. Deixar agir por 5 minutos e remover o excesso se necessário. Não enxaguar.

Artigos e Acessórios: Após a limpeza e secagem dos artigos e/ou acessórios, colocá-los por imersão na solução por 5 minutos. Enxaguar e secar antes do uso.

ECOMASTER

POR UM MUNDO MAIS LIMPO



FICHA TÉCNICA

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido, consulte de imediato o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Evite o contato com a pele e os olhos. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone 0800 - 0148110. Não reutilizar a embalagem vazia.

EMBALAGEM

Bombona plástica 5 litros, Frasco de 1 litro com dosador.

CONSERVAÇÃO

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

ECOMASTER QUÍMICA IND. E COM. LTDA
RUA JOAQUIM THOMAZ DA SILVA, 521
BAIRRO JARDIM MARACANÃ
UBERABA MG CEP 38041 097
(34) 3311 2005 WWW.ECOMASTER.IND.BR
ecomaster@ecomaster.ind.br
CNPJ - 05.642.412/0001-49
NºAut. MS - 3.04.145-2
PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA M/S Nº -